

## Jay 3 Standard ou Profundo

O sistema de Sedestação modular mais completo

### Características:

Base Jay 3 personalizável com 3 tamanhos de cavidade pélvica. Possibilidade de ajustar o tamanho da ondulada e os níveis de fluído/ar.

Base Jay 3 Standard ou Profunda.

Tecnologia Optiwell: tamanho e forma anatômica da cavidade pélvica para óptima estabilidade e redistribuição da pressão.

Opção de tecnologia de Fluído (Standard ou Personalizável) ou Ar (1 ou 2 válvulas). Imersão das tuberosidades isquiáticas até 4 cm.

Opção de funda resistente à Incontinência ou Microclimática para uma óptima dissipação do calor e da humidade.

Ampla gama de cunhas disponíveis.



### Indicações clínicas:

Usuario com risco elevado (*Jay3 Standard*) ou extremo (*Jay3 Profundo*) de escaras e necessidades de posicionamento de moderadas a muito altas, ou necessidades que podem ser alteradas com o tempo.

Postura simétrica ou assimétrica e necessidade de estabilidade lateral e antero-posterior.

Indicado em usuários incapazes de reposicionarem-se ou realizar independentemente as mudanças de peso.

**“Redistribuição da pressão superior, óptima estabilidade postural e posicionamento de moderado a muito alto”**



Base sólida de madeira

### Tamanhos JAY® 3

△ Apenas com altura Standard

Prof. cm	Largura da almofada										
	30	35	38	40	42	44	46	48	50	56	60
30	△	△									
35	△										
38											
40											
42											
44											
46											
48											
50											
56											
60											

### Jay 3 Pedido especial

A almofada Jay3 pode ser encomendada à medida do usuário tanto em largura como em profundidade para uma ótima adaptação. Consulte a folha de pedido “Jay 3 Modificado”

Altura Máx. (standard)	9,5 cm
Altura Máx. (Profundo)	10,8 cm
Peso máx. do utilizador	150 kg (Larguras 30-50cm) 227 kg (Larguras 56-60cm)
Garantia	2 anos




Para referências, opções e acessórios, tamanhos especiais ou modificações por favor consulte a folha de pedido.




## 1.) Base Jay 3. Duas profundidades—Standard e Profundo

A almofada Jay 3 está disponível tanto no perfil Standard como no perfil Profundo. A versão Profunda oferece uma imersão óptima para o usuário com elevado risco de escaras, que pode ter uma severa atrofia muscular e/ou compromisso de integridade da pele. A versão Standard oferece uma redistribuição da pressão e estabilidade para usuários com elevado risco de escaras, mas com menor comprometimento da massa muscular e integridade da pele.

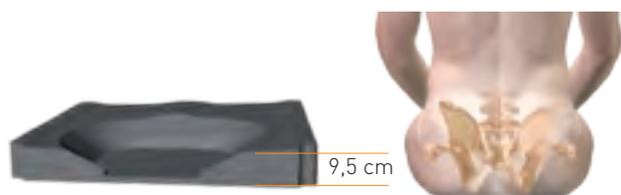

**Standard:** Usuários com risco alto de escaras.

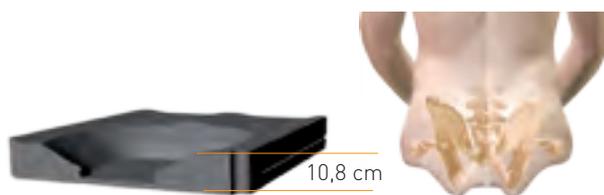

**Profundo:** Risco elevado de escaras- Requer a imersão máxima devido a uma atrofia muscular importante.

## 2.) Base Jay 3. Cavidade Pélvica Optiwell™ PLA (PLA = Pelvic Loading Area)

Desenhada baseando-se em numerosos estudos antropométricos, a ondulada Optiwell da almofada Jay3 tem a forma e o tamanho óptimos para redistribuir uniformemente a pressão sob a pélvis proporcionando uma efectiva proteção antiescaras junto com a máxima estabilidade.

A cavidade pélvica (PLA) está dimensionada para acomodar as medidas antropométricas da pélvis e é independente da largura da almofada.

Consegue-se uma óptima imersão dos isquios no fluído/ar e a pressão distribui-se até ao fémur.

Mínimo risco de instabilidade lateral, obliquidade pélvica e risco potencial de úlceras por pressão.

A experiência indica que o tamanho da PLA standard da almofada é adequado para a maioria dos usuários.

Existem 3 tamanhos de PLA disponíveis..

A: Standard em tamanhos de 30 a 38cm



B: Standard em tamanhos de 40 a 48cm

C: Standard em tamanhos de 50 a 60cm

Mesmo assim, existe a opção de reduzir o tamanho da PLA mediante um anel redutor, para os casos em que seja necessário clinicamente otimizar a imersão e a estabilidade lateral.



Base de espuma Jay3 com cavidade pélvica Optiwell

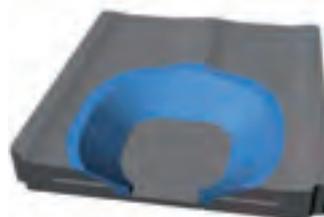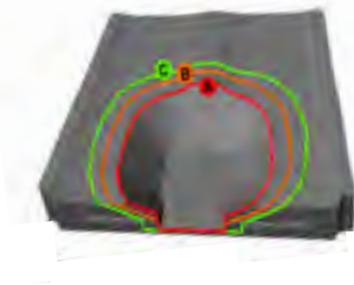

# Jay 3 Standard ou Profundo

O sistema de Sedestação modular mais completo

## 3) Opção de tecnologia de FLUÍDO ou AR

JAY 3 é o sistema de sedestação mais completo já que com a mesma base permite escolher entre tecnologia de FLUÍDO ou de AR, adaptando-se às necessidades clínicas e/ou preferências de cada usuário.

A bolsa de fluido ou ar está desenhada para acomodar, sempre, perfeitamente a forma e o tamanho da cavidade Jay3.

**Opção de Fluido Jay:** Ideal quando a facilidade de utilização e o mínimo de manutenção são prioridade.

### Bolsa de Fluido Standard (FF)

Indicado em posturas simétricas e condições clínicas estáveis

Volume de fluido pré-estabelecido e Standard

Opção de pedido especial como Overfill, Underfill ou ajustes assimétricos.



Jay3 com bolsa de fluido Standard

### Bolsa de Fluido Personalizável (FV)

Para avaliações mais personalizáveis: permite escolher o nível de fluido mais adequado, posicionar assimetrias e acomodar alterações posteriores na evolução do usuário.

Cada bolsa de fluido personalizável vem de série com 20% menos fluido que a bolsa standard (Underfill)

Cada bolsa de fluido personalizável incorpora de serie 2 pads de suplemento de fluido (com estes 2 pads incorporados temos o mesmo nível de fluido que na almofada standard).

Permite acomodar suplementos de fluido adicionais de diferentes tamanhos: S, M, L, XL (Overfill). (Cada bolsa de fluido personalizável possui 4 pontos de encaixe situados estrategicamente donde acomoda os suplementos de fluido extra).

Overfill, Underfill ou ajustes assimétricos segundo as necessidades.

Flexibilidade e versatilidade para satisfazer as necessidades clínicas.



Jay3 com bolsa de fluido Personalizável